

# GLUCOCARD™ X-METER



- **Dar patogiau** – nereikia koduoti
- **Dar mažiau kraujo** – tik 0,3 µl
- **Dar greičiau** – tik 5 sekundės
- **Dar didesnė atminties talpa** – 360 rezultatų
- **Dar ilgesnis baterijų tarnavimo laikas** – apie 2000 tyrimų
- **Dar didesnis ekranas ir skaitmenys**

*todėl patogus, paprastas ir patikimas kiekvienam...*

\* Tinka Glucocard X-SENSOR gliukozės testų juostelės.  
\* Glucocard X-METER rinkinyje rasite gliukomatį, 10 juostelių,  
10 adatėlių, piršto dūriklį, rankinę, diabeto dienyną, instrukciją.

Įgaliotas atstovas Lietuvoje

**interlux**

Uždaroji akcinė bendrovė  
Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius-21  
Tel. (8~5) 278 68 50, faks. (8~5) 279 67 28  
El.p. spirit@interlux.lt, <http://www.interlux.lt>



**ARKRAY**  
Pagaminta Japonijoje



# GLUCOCARD™ X-METER



Nuimkite piršto dūriklio dangtelį, bei prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su piršto dūriklio sudėtinėmis dalimis (žr. paveikslėliuką).

1



Įstatykite adatėlę į piršto dūriklį. Adatėlę stumkite į laikiklį tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

2



Rodyklės kryptimi stumkite užtaisymo svirtį aukštyn. Piršto dūriklis yra paruoštas darbui.

5



Atidarykite buteliuką ir išimkite testo juostelę, bei iš karto uždarykite buteliuko dangtelį.

6



Priglauskite piršto dūriklį prie piršto galiuko ir paspauskite mėlyną dūrio mygtuką.

9



Suformuokite reikiamą kraujo mėginio kiekį. Pirštą masažuokite ir spauskite labai švelniai, priešingu atveju, galite gauti netikslių rezultatą.

10



Išimkite panaudotą testo juostelę iš matuoklio. Matuoklis automatiškai išsijungia.

13



Nuimkite piršto dūriklio dangtelį. Uždėkite adatėlės apsauginį kamštelį ant panaudotos adatėlės.

14

Įgaliotas atstovas Lietuvoje

**interlux**

Uždaroji akcinė bendrovė • Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius-21


Tel. (8-5) 278 68 50, faks. (8-5) 279 67 28 • El.p. spirit@interlux.lt • <http://www.interlux.lt>

# PATOGU, PAPRASTA, PATIKIMA!



Nusukite ir nuimkite adatėlės apsauginį kamštelį. Neišmeskite jo, bet pasidėkite jį šalia.

3

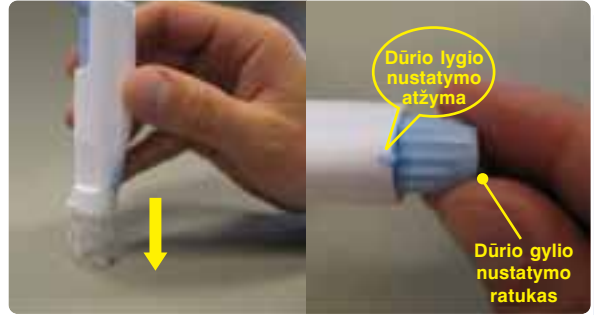

Uždėkite dangtelį ant piršto dūriklio. Pasukite dūrio gylio nustatymo ratuką į atitinkamą padėtį ties atžyma. Rekomenduojama pasirinkti „3-4“ lygį, tačiau kiek vienam yra individualus ir priklauso nuo odos storio.

4



Įstatykite testo juostelę į matuoklį. Išgirsite pyptelėjimą – matuoklis įsijungs automatiškai. Matuoklio nereikia koduoti – automatinis kodo nuskaitymas.

7



Prieš tyrimą švariai nusiplaukite rankas po vandeniu ir gerai nusausinkite. **SVARBU!** Jei naudojate spiritines priemones, palaukite kol dezinfekuota vieta nudžius arba gerai nuvalykite ją su sausos vatos gabalėliu. Priešingu atveju galite gauti netikslių rezultatą.

8



Testo juostelės galiuką priglauskite prie kraujo lašo. Juostelė pati pritraukia reikiamą kraujo kiekį (0,3μl) ir pasigirsta garsinis signalas „Pypt“.

11



Po 5 sekundžių pasigirsta pyptelėjimas ir ekrane pasirodo tyrimo rezultatas, data ir laikas.

12



Nukreipkite piršto dūriklį į apačią. Rodyklės kryptimi (žemyn) stumkite adatėlės išmetimo svirtį, kol adatėlė iššoks iš laikiklio.

15



Uždėkite dangtelį ant piršto dūriklio.

16

## ELEKTRONINIAI KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI



### MEDEL CHECK

- Automatinis – žastinis
- Kraujo spaudimas ir pulsas
- Aritmijos indikatorius
- 3-jų iš eilės matavimų funkcija ir vidurkio skaičiavimas
- Valdomas vienu mygtuku
- Didelis ekranas
- Kliniškai patikrintas (BHS A:A)



### MEDEL SELF

- Pusiau automatinis – žastinis
- Kraujo spaudimas ir pulsas
- Valdomas vienu mygtuku
- Didelis ekranas
- Kliniškai patikrintas



### MEDEL DAILY

- Automatinis riešo tipo
- Kraujo spaudimas ir pulsas
- Valdomas vienu mygtuku
- Didelis ekranas
- Kliniškai patikrintas

## KŪNO SUDĖTIES ANALIZATORIUS-SVARSTYKLĖS

### e-Body 205

Greita, patogiu,  
paprasa!

Su e-Body 205  
sužinok savo:

- Kūno svorį (kg)
- Kūno riebalų masę (%)
- Kūno riebalų perteklių (kg/%)
- Pilvo riebalų lygį (1-8)
- Raumenų masę (kg)
- Bazinę medžiagų apykaitą (kcal)
- Rekomenduojamą paros kcal kiekį
- Fizinio krūvio rekomendaciją



## BD Micro-Fine™ + adatėlės insulininiams penams

BD Micro-Fine™ + adatėlės tinka visų rūšių insulininiams penams BD, Eli Lilly, Aventis, NovoNordisk ir kt.:



- BD Pen / BD Pen Ultra / BD Pen Mini
- Novo Pen / NovoLet / Inno / InnoLet / Flexpen / InDuo
- HumaPen Ergo / Humalog Pen / Humulin Pen / HumaPlus / Humaject
- Autopen / Unipen / Penplus
- BerliPen / Omnican Pen / Diapen / OptiPen / OptiSet

Saugi ir patikima insulino injekcija:

- 12,7 mm adatėlė – turintiems antsvorį pacientams
- 8 mm adatėlė – normalaus kūno sudėjimo pacientams,
- 5 mm adatėlė – liekniems pacientams ir vaikams



Nesužnybus odos

Sužnybus

Teisingai sužnybta

Klaidingai sužnybta


Oda  
Poodiniai audiniai

Raumenys

- Kad insulinas efektyviai veiktų, injekcijos turi būti atliekamos į poodinius audinius, o ne į raumenis
- Sužnybus odą, yra mažesnė tikimybė, kad insulinas bus suleistas į raumenis
- Oda turi būti sužnybiama nyksčiu ir rodomuoju ar didžiuoju pirštu
- Šiais pirštais suimama oda ir poodinis audinys bei pakeliama, neličiant raumeninio audinio



5 mm adata 8 mm adata 12,7 mm adata

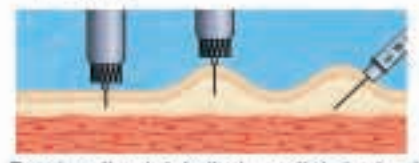

Trys insulino injekcijų į poodinį sluoksnį būdai, naudojant skirtingas adatėles:

5 mm 8 mm 12,7 mm

Igaliotas atstovas Lietuvoje

**interlux**

Uždaroji akcinė bendrovė • Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius-21  
Tel. (8-5) 278 68 50, faks. (8-5) 279 67 28 • El.p. spirit@interlux.lt • http://www.interlux.lt