

# SUPER GLUCOCARD II

Vartotojo instrukcija

## GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE MATUOKLIS



- **SUPER GLUCOCARD II** – matuoklis
- **GLUCOCARD Test Strip II** – gliukozės testų juostelės
- **Multi Lancet S** – piršto dūriklis
- **Multilet Super Soft** – adatėlės piršto dūrikliui

- Mažiau kraujo tyrimui
- Greitas atsakymas
- Paprastas valdymas – jokių mygtukų
- Juostelės pačios pritraukia reikiamą kraujo kiekį, todėl gaunami patikimesni tyrimo rezultatai
- Paskutinių tyrimų rezultatų atmintis
- Didelis kompaktiško matuoklio ekranas

**ARKRAY**   
Pagaminta Japonijoje

Oficialusis atstovas Lietuvoje

\* **Interlux** 

Uždaroji akcinė bendrovė • Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius-21  
Tel. (8~5) 278 68 50, faks. (8~5) 279 67 28  
El.p. spirit@interlux.lt • <http://www.interlux.lt>

Gamintojas:

  
**ARKRAY, Inc.**  
57 NISHI AKETA-CHO, HIGASHI-KUJO,  
MINAMI-KU, KYOTO, JAPAN

Igaliotas atstovas ES:

  
0 1 2 3


  
**ARKRAY Europe, B.V.**  
PROF. J.H. BAVINCKLAAN 5 1183  
AT AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

# SUPER GLUCOCARD II



Nuimkite piršto dūriklį dangtelį ir pasukite dūrio gylio nustatymo ratuką. **Pirmą kartą rekomenduojama pasirinkti lygį „2“.** Jei lygyje „2“ negaunate reikiamo kraujo mėginio kiekio, pasukite ratuką į aukštesnę padėtį.

1

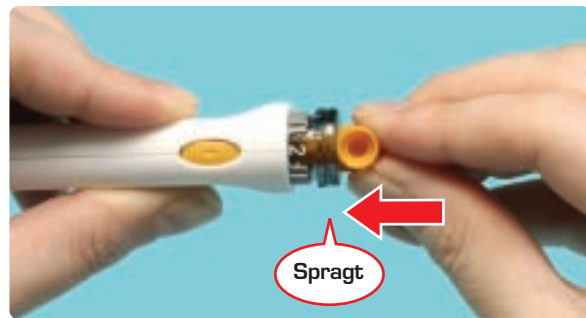

Adatėlę stumkite į laikiklį tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

2



Rodyklės kryptimi pastumkite užtaisymo svirtį (pilka) pirmyn, kol ji užsifiksuoja.

5




Atidarykite testo juostelės maišelį, maišelio galus sulenkite taip, kad išliktų testo juostelė.\*

6



Priglauskite prietaisą prie piršto ir paspauskite dūrio mygtuką (oranžinis).

9

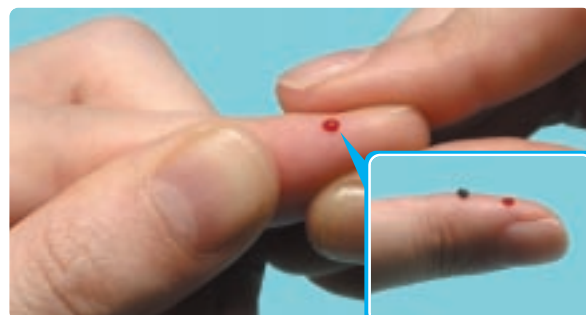

Suformuokite reikiamą kraujo mėginio kiekį.

10



Ištraukite testo juostelę, naudodami folijos maišelį, taip nesusitepsite krauju.

13



Nuimkite piršto dūriklį dangtelį.

14


Oficialusis atstovas Lietuvoje

**Interlux** 

Uždaroji akcinė bendrovė • Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius-21


Tel. (8~5) 278 68 50, faks. (8~5) 279 67 28 • El.p. spirit@interlux.lt • <http://www.interlux.lt>

# PATOGU, PAPRASTA, PATIKIMA!

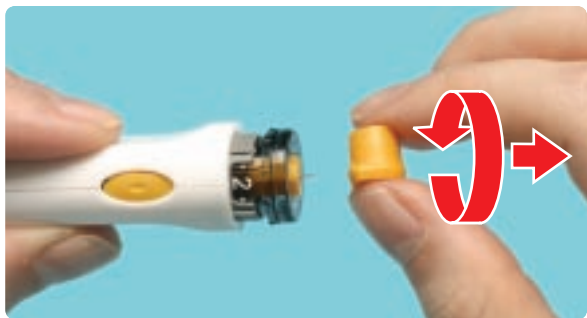

Nusukite adatėlės apsauginį kamštelį ir pasidėkite jį.

3

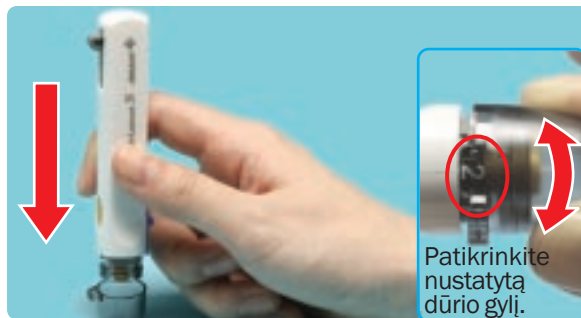

Uždėkite dangtelį ant piršto dūriklio.

4



Įkiškite testo juostelę į matuoklį nurodyta kryptimi, kišdami juostelę kol ši įsirems.

7



Dezinfekuokite pirštą. Palaukite kol dezinfekuota vieta nudžius. Priešingu atveju, galite gauti netikslų rezultatą.

8




Testo juostelės galiuką priglauskite prie kraujo lašo. Juostelė pati pritraukia reikiama kraujo kiekį.

11



Po 25 sekundžių pasigirsta pyptelėjimas ir ekrane pasirodo tyrimo rezultatas.

12

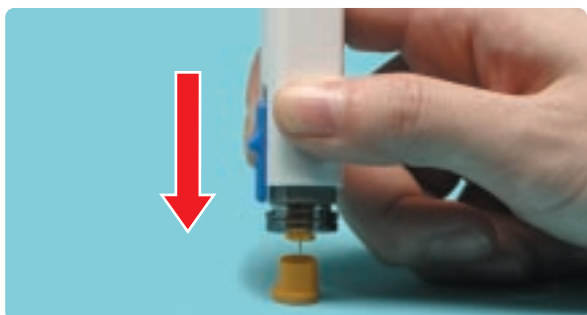

Uždėkite apsauginį kamštelį ant adatėlės.

15



Nukreipkite prietaisą į apačią ir rodyklės kryptimi stumkite adatėlės išėmimo svirtį (mėlyna) pirmyn, kol adatėlė iššoks iš laikiklio.

16


\* PASTABA. Prieš pradėdant naudoti naują testų pakuotę, aparatėlį reikia užkoduoti su „CALIBRATION STRIP“ kodine juostele, esančia testų pakuotėje, ją reikia įkišti ir palaikyti 5 sek.

## TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS

### 1 Baterijų įdėjimas/pakeitimas



Prieš darbą su gliukometru į baterijų sekciją reikia įdėti dvi ličio baterijas (žr. pav). Baterijoms nusilpus, gliukometro ekrano apačioje pasirodys simbolis – n. Pasirodžius šiam simboliui, Jums reikės pakeisti baterijas naujomis.

Baterijų gyvavimo trukmė 1000 tyrimų. Pasibaigus baterijoms, jas galima įsigyti foto prekių, elektros prekių parduotuvėse arba laikrodžių taisyklose.

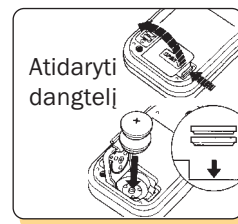



### 2 Kodinė juostelė

Atidarykite naują GLUCOCARD Test Strip testų juostelių dėžutę ir išimkite kodinę juostelę – „CALIBRATION STRIP“. Ją įstatykite nurodyta kryptimi į aparatėlį. Įkišus pasigirs pyptelėjimas, o ekrane pasirodys kodas (pavyzdžiui, F-5). Dabar aparatelis yra užkodotas šiai testų juostelių dėžutei.

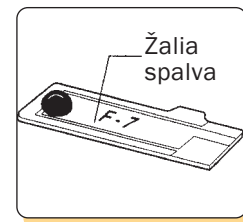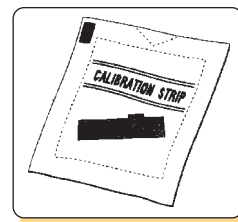

### 3 Testo juostelė

Praplėškite testo juostelės maišelį, jį plėšdami nuo praviro mėlyna spalva pažymėto galo iki maišelio vidurio (žr. pav). Pirštais nesiliedami prie testo juostelės, maišelio galus sulenkite taip, kad išlįstų testo juostelės galas. Testo juostelę įkiškite į aparatėlį nurodyta kryptimi, kišdami juostelę kol ši įsirems. Nuimkite maišelį. Pasigirs pyptelėjimas, o ekrane pasirodys užrašas „888“. Juostelės maišelio neišmeskite, jis bus reikalingas panaudotai juostelei išimti.

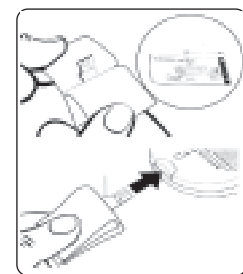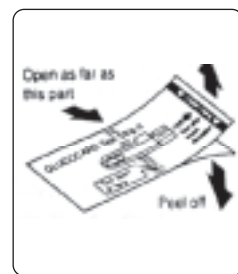


### 4 Kraujo mėginio paėmimas

Piršto dūriklį įsidurkite į pirštą ir suformuokite kraujo lašą. Testo juostelės galiuką priglauskite prie kraujo lašo (žr. pav.) ir palaukyti tol, kol išgirsite pyptelėjimą. Elektrodinės juostelės pačios pritraukia reikiamą kraujo kiekį. Testo juostelės neištraukite tol, kol vyksta tyrimas. Ekrane atsiranda skaičiai, rodantys iki tyrimo pabaigos likusį laiką – 25 sekundes. Po 25 sekundžių ekrane pasirodys tyrimo rezultatas. Norėdami gliukometrą išjungti, ištraukite testo juostelę. Kad nesusiteptumėte krauju, testo juostelę įkiškite į maišelį, iš kurio išėmėte juostelę, ištraukite ir išmeskite.

**Svarbu!** Imant kraujo mėginį testo juostelės galiuką visada priglauskite prie kraujo (žr.pav. „Teisingai“)

Niekada nelašinkite kraujo ant testo juostelės iš viršaus (žr.pav. „Neteisingai“).

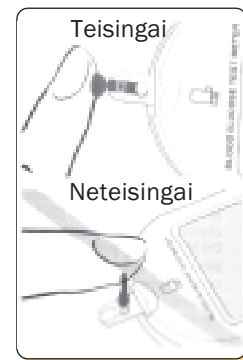

### 5 Atmintis

Norint pažiūrėti atmintyje saugomus rezultatus, į matuoklį įkiškite „CHECK STRIP“ juostelę, esančią matuoklio rankinėje. Pasigirdus pyptelėjimui, ekrane pasirodys patikros juostelės reikšmė. O po 10 sekundžių ekrane pasirodys raidė „A“ ir reikšmė (tai 20 tyrimų vidurkis), po to seks 20 atmintyje esančių tyrimų rezultatų, pradedant nuo anksčiausiai atlikto tyrimo link seniausiai atlikto. Pasirodžius visiems 20 rezultatų, gliukometras automatiškai išsijungia. Patikros juostelę ištraukite iš gliukometro ir įdėkite į plastikinį maišelį. Juostelę laikykite rankinėje.

**GARANTIJA: neribotam laikui.**

**Sugedus matuokliui, jis pakeičiamas nauju.**

**INFORMACIJA tel.**

**8~5 278 68 50, 8 685 18 434**

Oficialusis atstovas Lietuvoje

**Interlux** 

Uždaroji akcinė bendrovė • Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius-21  
Tel. (8~5) 278 68 50, faks. (8~5) 279 67 28  
El.p. spirit@interlux.lt • http://www.interlux.lt

Gamintojas:



**ARKRAY, Inc.**  
57 NISHI AKETA-CHO, HIGASHI-KUJO,  
MINAMI-KU, KYOTO, JAPAN

Įgaliotas atstovas ES:



EC REP

**ARKRAY Europe, B.V.**  
PROF. J.H. BAVINCKLAAN 5 1183  
AT AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS